

# 美若康睛透多效保養液

## miacare Clarion multi-purpose solution

衛部醫器製字第005539號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

清除油脂 / 清潔沖淨 / 保濕潤滑 / 消毒殺菌 / 幫助去蛋白 / 浸泡保存

6 道保養手續一次完成！

適應症：適用於所有硬式、軟式隱形眼鏡 (包含矽水膠軟式隱形眼鏡與彩色軟式隱形眼鏡)

### 【特性】

睛透多效保養液具有清潔殺菌、保濕與去蛋白功能之外，還能去除油脂，讓鏡片潔淨，確保眼睛健康與視線清晰！

- 潔淨：清除油脂與蛋白
  1. EDTA 可避免與鏡片上的蛋白質反應形成沈積物
  2. Poloxamer 具有親水和親油雙重特性，可除油脂、蛋白等污物
- 保濕：添加兩種保濕潤滑成份
  1. HPMC 能夠形成保濕層，增加鏡片配戴舒適度
  2. Poloxamer 在鏡片上形成潤滑的保護層，使鏡片保濕
- 消毒殺菌：殺死鏡片上的有害微生物與細菌，避免感染
- 清潔沖淨：洗去鏡片上的雜質異物，使鏡片乾淨

### 簡單 3 步驟，潔淨好輕鬆

- 接觸隱形眼鏡前請徹底洗淨並擦乾雙手，將鏡片自右眼取下
  1. 將鏡片置於手掌，滴數滴睛透多效保養液，以食指（或食指與拇指）輕搓鏡片約 20 秒，以清除雜質與沈澱物

2. 以睛透多效保養液沖洗鏡片

3. 將鏡片置於鏡盒內，注入睛透多效保養液，靜置浸泡至少 4 小時或隔夜，確保有效殺菌，及增強鏡片去除沈澱物的效果

- 鏡盒中使用過的保養液請倒掉換新，切勿回收重複利用；亦不可以清水沖洗與浸泡鏡片，以免污染鏡片危害眼睛健康
- 睛透多效保養液可以潤濕或潤滑鏡片
- 左眼鏡片重複步驟 1、2、3，蓋好蓋子
- 配戴隱形眼鏡前，也可以用睛透多效保養液沖淨鏡片
- 也可以用睛透多效保養液沖淨鏡片盒

**【成分】**睛透多效保養液為—無菌、緩衝、等張的水溶液。含有：Poloxamer，EDTA，HPMC，Polyaminopropyl Biguanide.

#### **【警告】**

不可混有其他液體，按指示除外。

除醫師指示外，不可同時使用任何眼藥。

若有刺激發生或持續，則停止使用，卸下鏡片，請教你的眼科醫師。

不可使用任何熱消毒方法。

不可重複使用多效保養液（使用後之多效保養液須拋棄）

#### **【保養液儲存方式】**

- 儲存於室溫 30°C 以下，遠離直接日曬，不可冷凍
- 使用後蓋緊瓶蓋。開封後即使未使用，建議 90 天後仍須丟棄
- 放置於兒童拿不到的地方

【包裝】500 毫升塑膠瓶裝以下，內附水盒。

藥商名稱：明基材料股份有限公司

藥商地址：桃園市龜山區建國東路 29 號

製造廠名稱：明基材料股份有限公司委託南光化學製藥股份有限公司製造

製造廠地址：台南市新化區中山路 1001 號、1001-1 號

Version 2